



## iM3 Luxator 5pc Set - D4500

iM3 Luxators, sizes 1-5mm are very fine and sharp. The 5 sizes allow their use for both feline and Canine teeth.


Luxators are used for cutting the periodontal ligament and expanding the alveolus (tooth Socket) by inserting the instrument tip into the periodontal space with a gentle side to side rocking motion continuing down the length of the root.

Luxator tips are extremely fine and sharp and can be easily damaged if used as an elevator. The tip is not designed for the extra force used with elevation.

iM3 recommends winged elevators for elevating a tooth to be extracted.

Luxators and elevators should be sharpened daily using the iM3 wedge dental sharpening stone, available from iM3 or any of our distributors:  
iM3 Code A3110

[www.im3vet.co.uk](http://www.im3vet.co.uk) | [www.im3vet.eu](http://www.im3vet.eu) | [sales@im3dental.com](mailto:sales@im3dental.com)

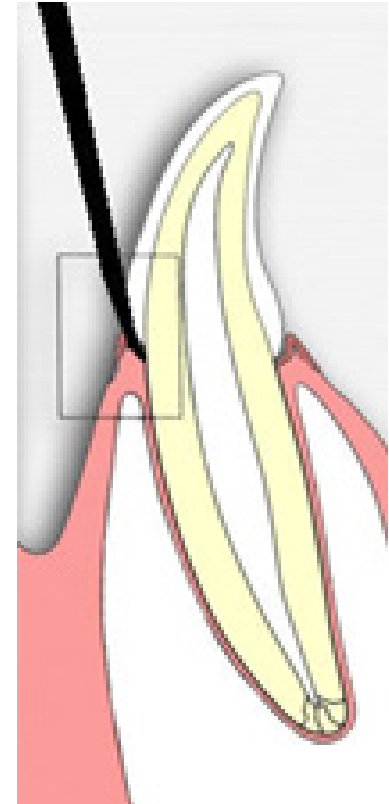



## iM3 Luxatorensset, fünfteilig – D4500

iM3-Luxatoren, Größe 1-5 mm sind sehr dünn und scharf. Die fünf verschiedenen Größen ermöglichen den Einsatz bei Katzen- und Hundezähnen.

Luxatoren werden zum Zerschneiden vom peridontalen Ligament und Weiten der Alveole (Zahnhöhle) eingesetzt, indem man die Instrumentenspitze mit einer behutsamen Hin- und Herbewegung im Parodontalspalt stetig entlang der Zahnwurzel nach unten führt. Die Luxatorspitze ist extrem dünn und scharf und kann einfach beschädigt werden, wenn sie wie ein Elevator verwendet wird.

Die Spitze ist nicht dazu konzipiert den zusätzlichen Druck bei der Verwendung als Elevator standzuhalten. iM3 empfiehlt zusätzlich Elevatoren mit Ellipsenschliff zum Lockern des Zahnes für die Extraktion.

Luxatoren und Elevatoren sollten täglich mit dem iM3 Schleifstein geschärft werden:

iM3 Artikel A3110. Sie erhalten diesen Schleifstein direkt bei iM3 oder bei einem unserer Händler.

[www.im3vet.co.uk](http://www.im3vet.co.uk) | [www.im3vet.eu](http://www.im3vet.eu) | [sales@im3dental.com](mailto:sales@im3dental.com)

